

## INDICATIES

**Primair of secundair lymfoedeem, chronisch oedeem. Als zelfstandige behandeling of als onderdeel van een combinatiebehandeling.**

Bij veneuze aandoeningen en perifere arteriële aandoeningen waarbij de absolute bloeddruk in de enkel hoger is dan 60 mmHg; ABPI 0,5 - 0,8; of waarbij verminderde compressie geïndiceerd is.

Kan worden gebruikt bij beenzweren of wonden waarbij overeenstemming problematisch is. Waar de wond bedekt is met een primair verband en waar lekkage binnen een absorberend verband blijft.

**Comfiwave Borstband:** Borstzwellung na lumpectomie, verdikking of fibrose van de weefsels.

### ABSOLUTE CONTRA-INDICATIES

Niet gebruiken in gevallen van:

Gevorderde perifere arteriële occlusieve ziekte; gedecompenseerde hartziekte; ongecontroleerd congestief hartfalen; onbehandelde septische flebitis; phlegmasia cerulea dolens. Allergie voor één van de materialen die in het kledingstuk worden gebruikt: Katoen; Polyurethaan; Polyester.

Niet te gebruiken bij wonden die veel vocht afgeven of als afbouwproduct na wondgenezing of ontzwellende behandeling.

### RELATIEVE CONTRA-INDICATIES
















Kan soms tot problemen leiden:

Immobiliteit (bedlegerigheid); huidinfecties; steundermatosen; tranende dermatosen; onverenigbaarheid met stof; verminderde gevoeligheid van het ledemaat (bijv. bij diabetes mellitus); etterende dermatosen; primair chronische polyartritis; gevorderde perifere neuropathie; primaire chronische artritis; osteoporose stadium 3&4.

Haddenham Healthcare aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van enige contra-indicaties voor het gebruik van dit product.

## FORMAAT EN KLEURCODERING

**Let op bij het aantrekken:** In de bovenrand van alle Comfiwave-kleding zijn gekleurde lipjes gebreid, behalve bij de Dij met Heup. Bij een Comfiwave dijbeen met heup zitten de gekleurde lipjes in plaats daarvan langs de onderrand van het kledingstuk.




	KORT	NORMAAL	LANG
S			
M			
L			
XL			
XXL			

Kijk voor volledige maattabellen op [www.comfiwave.info](http://www.comfiwave.info)



## GEBRUIKSAANWIJZING

*Comfiwave*

 [www.hadhealth.com](http://www.hadhealth.com)  
 01844 208842  
 [sales@hadhealth.com](mailto:sales@hadhealth.com)

 **Haddenham Healthcare Ltd,**  
4D Drakes Drive,  
Long Crendon, HP18 9BA  
United Kingdom

 **Emergo Europe**  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
The Netherlands



## ALGEMEEN

Comfiwave compressiekleding is zeer effectief bij de behandeling van lymfatische en veneuze aandoeningen. Het model en de maat van de compressiekleding staan op de buitenverpakking. Het therapeutische effect van de kledij vereist een juiste pasvorm. Verkeerd passende compressiekleding kan problemen veroorzaken tijdens het dragen. Het kledingstuk mag alleen worden gebruikt als het is voorgeschreven of aanbevolen door een zorgverlener. Draag volgens de instructies van uw arts.

**Let op:** Scherpe vingernagels, ringen en armbanden kunnen het kledingstuk beschadigen. Losse draden of lussen mogen nooit worden uitgetrokken of afgeknipt.

Het volgende kan uw kledij beschadigen: zalf, benzine, olie, stomerijvloeistof, terpentijn. Directe hitte: strijken, radiatoren, hete wasdrogers, enz. Lange of scherpe teennagels/vingernagels. Bewaren in direct zonlicht. Onjuiste toepassing of gebruik. Defecte schoenen.

Het golfpatroon en de ribbels in het kledingstuk zorgen ervoor dat de weefsels zachter worden, terwijl de afvoer van vocht door de weefsels wordt bevorderd. Daarom zul je bij het uitdoen van het kledingstuk inkepingen op je ledemaat hebben, maar dit is niets om je zorgen over te maken en de inkepingen zouden vanzelf moeten verdwijnen.

In uitzonderlijke gevallen kan compressiekleding allergische reacties veroorzaken. Als er acute pijn in de ledematen of huidirritaties optreden trek het kledingstuk uit en raadpleeg wordt gedragen, verwijder het kledingstuk dan en raadpleeg onmiddellijk uw arts of zorgverlener.

## OPSLAG / GARANTIE

Medische compressiekleding moet worden bewaard op een koele, droge, donkere plaats zonder blootstelling aan direct zonlicht, extreme temperaturen of uitlaatgassen. Onder de juiste opslagomstandigheden is een houdbaarheid van 3 jaar gegarandeerd. Medische compressiekleding die vaak wordt gedragen, is onderhevig aan materiaalveroudering en natuurlijke slijtage (bijv. vaak wassen). Voor kledij die in gebruik is, is de garantieperiode 6 maanden.

Kledingstukken mogen niet gebruikt worden na de vervaldatum die op de buitenkant van de verpakking staat. Aan het einde van hun levensduur kunnen kledingstukken worden weggegooid als huishoudelijk afval.

## DE KLEDIJ AANTREKKEN

Bij het aantrekken van je kledingstuk raden we je aan rubberen handschoenen en/of een aantrek hulpmiddel te gebruiken. Als je een aantrek hulpmiddel hebt, volg dan de instructies van het aantrek hulpmiddel.

**Let op:** Scherpe nagels, ringen en armbanden kunnen het kledingstuk beschadigen. Ringen en armbanden moeten worden verwijderd voordat je het kledingstuk aantrekt.

- Zorg ervoor dat het lichaamsdeel goed droog is voordat je het kledingstuk aanbrengt.
- Voor beenstukken, vouw binnenste buiten tot over het voetgedeelte, schuif omhoog over de voet en plaats de hiel in de zakvorm.
- Voor mouwen met een want vouw je de mouw naar beneden, binnenste buiten tot aan de pols. Voor mouwen zonder want trek het kledingstuk over de hand zodat het bij de pols zit.
- Laat het kledingstuk geleidelijk in stapjes, een paar centimeter per keer, naar boven glijden en leg het op de plek waar het moet eindigen.
- Ga met de palm van je hand op en neer over je ledemaat om eventuele vouwen/overstrekking glad te strijken en een goede pasvorm te krijgen.

## DE KLEDIJ UITTREKKEN

Als je het kledingstuk uittrekt, raden we je aan rubberen handschoenen en/of een uittrek hulpmiddel te gebruiken. Als je een uittrek hulpmiddel hebt, volg dan de instructies van het uittrek hulpmiddel.

Het golfpatroon en de ribbels in het kledingstuk bevorderen de verzachting van de weefsels en daarom kun je bij het verwijderen van het kledingstuk inkepingen op het lichaamsdeel hebben.

**Let op:** Scherpe nagels, ringen en armbanden kunnen het kledingstuk beschadigen. Ringen en armbanden moet je afdoen voordat je het kledingstuk uittrekt.

- Voor beenkousen, trek de bovenkant van het kledingstuk binnenste buiten tot aan de voet, laat het voetgedeelte zitten en zorg ervoor dat de stof niet rond de enkel wordt gerimpeld.
- Plaats je duimen bij de noppen aan de buitenkant van je 'enkelbeen', tussen je hiel en je kous. Doe de kous voorzichtig uit.
- Als je een mouw uittrekt, trek je het kledingstuk voorzichtig naar beneden. Rol de kledij niet af.

## DE KLEDIJ WASSEN

- Wassen wanneer nodig. Afwisseling van verschillende kledingstukken verbetert de levensduur van alle kledingstukken.
- Was het kledingstuk met een normaal wasmiddel.
- Was op een maximale wastemperatuur van 40°C met een zeer mild proces / fijne was of handwas.
- Hardnekkige vlekken kunnen voor het wassen voorzichtig worden ingewreven met een spons.
- Wasadditieven zoals wasverzachter, optische witmaker of vlekkenverwijderaar mogen worden gebruikt.
- NIET BLEKEN



## DE KLEDIJ DROGEN

- Drogen aan de waslijn of in de droogtrommel op een lage temperatuur
- NIET STRIJKEN
- NIET UITWRINGEN
- NIET CHEMISCH REINIGEN

