



easywrap[®]

GEBRUIKSAANWIJZING



Haddenham Healthcare Ltd
4D Drakes Drives, Long Crendon,
HP18 9BA
United Kingdom





Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



easywrap

| | |
|---|-------|
| ALGEMENE INFORMATIE | pg.4 |
| VOERING. | pg.6 |
| VÓÓR HET AANBRENGEN | pg.7 |
| ALGEMENE INSTRUCTIES VOOR MONTAGE | pg.8 |
| VERWIJDEREN | pg.26 |
| VERZORGINGSINSTRUCTIES. | pg.27 |
| OPSLAG, GARANTIE EN VERWIJDERING | pg.28 |
| SLIJTAGE | pg.29 |
| AANWIJZINGEN | pg.30 |

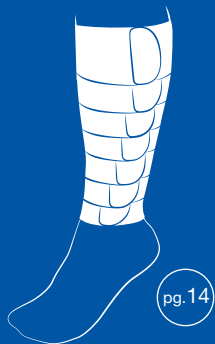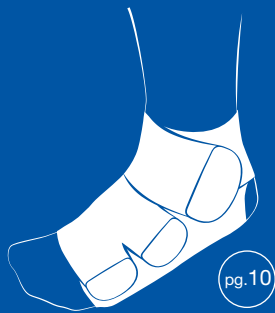

HOE DOET U UW
easywrap OM?

ALGEMENE INFORMATIE

Dank u dat u voor easywrap hebt gekozen. easywrap producten zijn zeer effectief bij de behandeling van lymfatische en veneuze aandoeningen. easywrap biedt professionals in de gezondheidszorg de mogelijkheid om oedeem te behandelen in combinatie met of waar compressieverband en/of compressiekousen niet geschikt zijn. easywrap is een wikkelapparaat met een laag profiel, waarvoor een octrooi is aangevraagd en dat zich aan de ledemaat aanpast om een langdurige compressietherapie te bieden.

Het easywrap-assortiment is ontwikkeld om compressietherapie te bieden die vergelijkbaar is met die van kort stretchverband met hoge werkdruk en lage rustdruk. In tegenstelling tot traditionele niet-elastische kledingstukken zal easywrap echter ook effectieve compressie blijven bieden naarmate uw zwelling afneemt. Dit leidt tot vermindering van het oedeem terwijl het comfort voor de patiënt behouden blijft en de aanpassingen tot een minimum beperkt blijven. Als er een geschikt absorberend verband onder wordt gedragen, zijn

easywrap producten geschikt om over matig exsuderende wonden te dragen. easywrap kan ook worden gebruikt als tweede laag over kousen (indien beoordeeld door een specialist) om een rebound-oedeem te voorkomen.

Het therapeutische effect van easywrap vereist een juiste pasvorm. Verkeerd passende easywrap producten kunnen problemen veroorzaken tijdens het dragen. easywrap mag alleen worden gebruikt indien voorgeschreven of aanbevolen door een professional in de gezondheidszorg. Voor een maximaal therapeutisch effect moet easywrap worden gedragen vanaf het moment dat u opstaat tot u naar bed gaat. Draag het niet tijdens bedrust, tenzij uw arts of specialist u dit opdraagt. Zeer zelden kunnen compressiekleding allergische reacties veroorzaken.

Als er acute pijn in de ledematen of huidirritaties optreden terwijl de easywrap wordt gedragen, verwijder de kleding dan en raadpleeg onmiddellijk uw arts.

VOERING

We raden aan om een easywrap Voering aan te brengen voordat u het easywrap productassortiment voor de onderste ledematen aanbrengt.

Let op: Bedek open wonden voordat u de voering of een ander easywrap-product aanbrengt.



VÓÓR HET AANBRENGEN



Om het aanbrengen te vergemakkelijken, raden we aan de easywrap bevestigingsslipjes terug op zichzelf te vouwen voordat u kledingstukken aanbrengt.

Het aanbrengen van een easywrap is zo heel eenvoudig



POSITIE >

1 Plaats de band op de ledemaat om een correcte plaatsing te garanderen en zorg voor een overlap van 50%.



STREKKEN >

2 Strek de band voorzichtig rond het ledemaat totdat u aanvoelt dat het materiaal “blokkeert”



VASTMAKEN

3 Met behoud van het strekken bevestigt u de band met het bevestigingslipje om het juiste compressieniveau toe te passen.

Voor specifieke instructies voor uw kleding zie pagina's pag. 10-25

ZORG VOOR UW KLEDINGSTUK

ZEKER DOEN



Was voeringen om de 1-2 dagen



Sluit bevestigingsstukken op kledingstukken voor het wassen



Was uw kleding indien mogelijk in een waszak

NIET DOEN



Maak de bevestiging vast aan de binnenkant van de banden



Gebruik wasadditieven zoals wasverzachter, optische witmaker of vlekverwijderaar.



Droog kledingstukken op een radiator of in een droger

Voor meer gedetailleerde informatie over het verzorgen en opbergen van uw kledingstuk, zie pag. 29

easywrap VOET AANBRENGEN



1 Verwijder het Voetgedeelte uit de verpakking



2 Leg het voetgedeelte op de grond en plaats uw hiel stevig in de opening aan de achterkant.

easywrap VOET AANBRENGEN



3 Trek vervolgens voorzichtig aan beide zijden van de riem die het dichtst bij uw tenen ligt totdat u het materiaal voelt 'blokkeren'.



4 Terwijl u de spanning behoudt, plaatst u het uiteinde van de riem zonder het bevestigingslipje over uw voet en bevestigt u deze met de andere kant.

easywrap VOET AANBRENGEN



5 Herhaal dit voor de tweede riem.



6 Trek vervolgens voorzichtig aan beide uiteinden van de band aan de achterkant van de voet totdat ze 'blokkeren'.

easywrap VOET AANBRENGEN



7 Met behoud van de spanning breng één uiteinde van de band naar beneden en over de bovenkant van uw voet en bevestig.



8 Herhaal met het andere uiteinde van de band, in de tegenovergestelde richting.

easywrap BEEN AANBRENGEN



1 Verwijder het Been uit de verpakking en vouw de bevestigingslipjes terug op zichzelf om het aanbrengen te vergemakkelijken (zie bladzijde 7).

2 Plaats de kortste band van de easywrap net boven het enkelbeen en zorg ervoor dat deze de easywrap Voet overlapt.

easywrap BEEN AANBRENGEN



3 Trek voorzichtig aan beide kanten van de onderste band totdat u het materiaal voelt 'blokkeren'.



4 Met behoud van de spanning plaatst u het uiteinde van de band, zonder het bevestigingslipje, over uw enkel.

easywrap BEEN AANBRENGEN



5 Maak dan vast met de andere kant.




6 Herhaal het proces, waarbij elke band wordt bevestigd terwijl u het been omhoog beweegt, zodat de banden plat worden aangebracht zonder vouwen.

easywrap BEEN AANBRENGEN



7 easywrap Been zit ongeveer twee vingerbreedtes onder de plooi aan de achterkant van uw knie wanneer u het correct aanbrengt. Als u geen easywrap Dij aanbrengt, vouw dan de overtollige voering over de bovenkant van het kledingstuk.

easywrap DIJ - KNIE-SECTIE AANBRENGEN

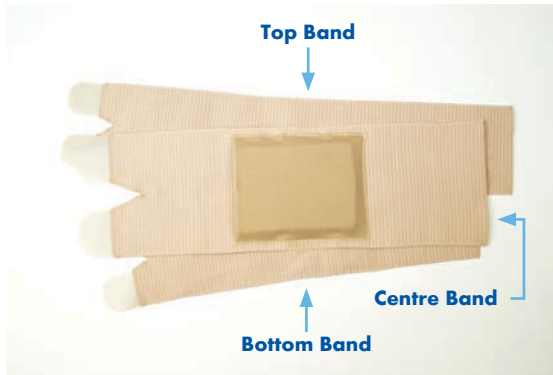

1 De easywrap Dij bestaat uit een aparte knie (boven) en een Dijgedeelte. Het Kniegedeelte wordt eerst aangebracht. Haal beide delen uit hun verpakking en vouw de bevestigingslipjes op zichzelf terug (zie pagina 7).

18

2 Plaats de middenband (met het schuimkussentje) achter uw knie. Trek voorzichtig aan beide kanten van de band totdat u het materiaal voelt 'blokkeren'.

easywrap DIJ - KNIE-SECTIE AANBRENGEN



3 Met behoud van de spanning plaatst u het uiteinde van de band, zonder de bevestigingslipjes, over uw onderbeen.



4 Maak de band vast door de twee bevestigingslipjes over de bovenkant te bevestigen.

TIP: Breng het kniegedeelte aan met gestrekt been voor de beste aanbrengresultaten.

easywrap DIJ - KNIE-SECTIE AANBRENGEN



5 Trek vervolgens voorzichtig aan beide uiteinden van de onderste band totdat u het materiaal voelt 'blokkeren'. Als u een easywrap Been hebt aangebracht, zorg er dan voor dat het overlapt.



6 Met behoud van de spanning plaatst u het uiteinde van de band, zonder de bevestigingslipjes, over het gedeelte van de kuit onder uw knie.

easywrap DIJ - KNIE-SECTIE AANBRENGEN




7 Maak de band vast door de twee bevestigingslipjes over de bovenkant te bevestigen.



8 Bevestig ten slotte de bovenste band over uw onderbeen, op dezelfde manier als de onderste band.

easywrap DIJ AANBRENGEN

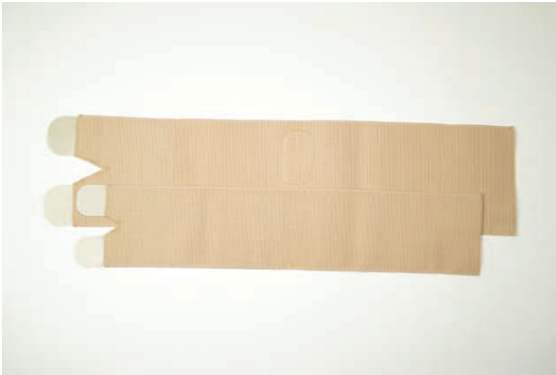

1 Verwijder de easywrap Dij uit de verpakking en vouw de bevestigingslipjes terug op zichzelf om het aanbrengen te vergemakkelijken (zie bladzijde 7).

22



2 Plaats het kledingstuk onder / achter uw dij met de kortere banden dicht bij de knie en de langere banden aan de bovenkant van uw dij. Zorg ervoor dat de onderkant de bovenste band van het kniegedeelte overlapt.

easywrap DIJ AANBRENGEN



3 Trek voorzichtig aan beide uiteinden van de band totdat u voelt dat ze 'blokkeren'.



4 Terwijl u de spanning vasthoudt, plaatst u het uiteinde van de band, zonder de bevestigingslipjes, over uw onderbeen.

easywrap DIJ AANBRENGEN



5 Bevestig de band door de twee bevestigingslipjes over de bovenkant te bevestigen.



6 Ga verder met de resterende band(en) om ervoor te zorgen dat ze plat worden aangebracht zonder vouwen.

easywrap DIJ AANBRENGEN



- 7 Vouw eventuele overtollige voering over de bovenkant van het kledingstuk.

UW easywrap VERWIJDEREN

Begin bij het verwijderen van de easywrap met de band die het dichtst bij uw bovenlichaam ligt en werk weg van uw bovenlichaam.

Rol voorzichtig elk bevestigingslipje terug op de buitenkant van de band.

Door het kledingstuk op te slaan en te wassen met de gesloten bevestigingslipjes wordt voorkomen dat de bevestigingen het kledingstuk of andere kledingstukken beschadigen.

VERZORGINGSINSTRUCTIES



easywrap Voeringen komen in direct contact met de huid en moeten idealiter dagelijks of ten minste om de dag worden gewassen. Andere producten van easywrap, die niet direct in contact komen met de huid, moeten indien nodig worden gewassen. Patiënten van wie easywrap-producten vaker moeten worden gewassen, moeten overwegen om er één te dragen en één te wassen, dit zal de algehele levensduur van beide kledingstukken verbeteren.

easywrap moet op dezelfde manier worden verzorgd als delicate kleding. We raden u aan uw easywrap in een wasnetje te wassen. Sluit de bevestigingslipjes vóór het wassen.

Gebruik voor het wassen van een easywrap-product een normaal mild wasmiddel. **GEBRUIK GEEN WASADDITIEVEN** zoals wasverzachter, optische witmaker of vlekverwijderaar. Spoel het kledingstuk goed af. Droog vervolgens tussen twee handdoeken, zonder uit te wringen. Druk overtollig vocht uit. Droog plat of hang op om te drogen. **NIET DROGEN OP EEN RADIATOR OF IN DIRECT ZONLICHT. DROOG HET KLEDINGSTUK NIET IN EEN DROGER.** Let op: scherpe nagels, ringen en armbanden kunnen het kledingstuk beschadigen. Pluisjes of lussen mogen nooit worden uitgetrokken of afgesneden.

OPSLAG, GARANTIE EN VERWIJDERING

Bij normaal gebruik van easywrap-producten bedraagt de garantietermijn 6 maanden. De garantie dekt geen normale slijtage, verkeerd gebruik of onjuiste verzorging. easywrap-producten mogen niet langer worden gebruikt dan de vervaldatum die op de buitenkant van de verpakking is afgedrukt. Bewaar uw compressiekleding op kamertemperatuur en bescherm het tegen directe blootstelling aan zonlicht, warmte en vocht.

Wanneer easywrap niet in gebruik is, moet het worden bewaard met de bevestigingsmiddelen gesloten.

Aan het einde van hun leven kunnen easywrap-producten als huishoudelijk afval worden weggegooid.

SLIJTAGE

De buitenkant van easywrap-producten is speciaal ontworpen om te hechten aan klittenband bevestigingslipjes. Uw kledingstuk kan er pillig uitzien, dit is onderdeel van de normale slijtage van het kledingstuk.

De binnenkant van de banden van easywrap is geweven om zacht en comfortabel te zijn. Als de Easywrap-bevestigingslipjes aan de binnenkant van de banden van het kledingstuk blijven haken, kunnen deze gaan pillen. Verwijder of snijd dit pluizen niet omdat dit het kledingstuk kan beschadigen. Het volgen van de instructies voor het aan- en uittrekken zal helpen om het pluizen te verminderen.

De bevestigingslipjes kunnen na het wassen krullen. Als dit gebeurt, rol de lipjes dan voorzichtig terug in de tegenovergestelde richting.

INDICATIES VOOR DE ONDERSTE LEDEMATEN

Het type easywrap staat op het etiket van het kledingstuk.

Primaire Indicaties

easywrap Light (20-30mmHg) voor mild tot matig lymfoedeem of oedeem; palliatieve zorg

easywrap Strong (30-40mmHg) voor ernstig en hardnekkig lymfoedeem of oedeem; terugkerend oedeem; primair lymfoedeem van lange duur

Secundaire Indicaties

easywrap Light (20-30mmHg) voor de controle van lichte tot matige zwelling door veneuze en andere zwellingsaandoeningen

easywrap Strong (30-40mmHg) voor controle van matige tot ernstige zwelling van veneuze en andere zwellingsaandoeningen

ABSOLUTE CONTRA-INDICATIES

Niet te gebruiken in gevallen van: gevorderde perifere arteriële occlusieve ziekte; gedecompenseerde hartziekte; ongecontroleerd congestief hartfalen; onbehandelde septische flebitis; phlegmasia coerulea dolens. Bekende allergie voor elk materiaal dat in de kledingstukken wordt gebruikt.

RELATIEVE CONTRA-INDICATIES

Kan af en toe tot problemen leiden in gevallen van: Immobiliteit (bedlegerigheid); huidinfecties; etterende dermatosen; incompatibiliteit met stof; verminderde gevoeligheid van het ledemaat (bijv. bij diabetes mellitus); etterende dermatosen; primair chronische polyarthritis; gevorderde perifere neuropathie; primaire chronische artritis. Allergische of gelijkaardige reacties op de stof.

IFU-EWL-001 ver.01

www.easywrap.info



www.hadhealth.com



01844 208842



sales@hadhealth.com

easywrap