

Microfine



Gebruiksaanwijzing



Haddenham Healthcare Ltd, 4D Drakes Drive,
Long Crendon, HP18 9BA, United Kingdom



Emergo Europe, Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem, The Netherlands

Haddenham compressiekleding is zeer effectief bij de behandeling van lymfatische en veneuze ziekten. Het type Haddenham compressiekleding staat vermeld op het kledinglabel en op de buitenverpakking. Het therapeutische effect van het kledingstuk vereist een juiste pasvorm. Het verkeerd passen van compressiekleding kan problemen veroorzaken tijdens het dragen. Het kledingstuk mag alleen worden gebruikt als het wordt voorgeschreven of aanbevolen door een professional in de gezondheidszorg. Voor een maximaal therapeutisch effect moet het kledingstuk worden gedragen vanaf het moment dat u opstaat tot u naar bed gaat. Draag het kledingstuk niet tijdens bedrust, tenzij u hiertoe wordt opgedragen door uw zorgverlener.

Let op: scherpe nagels, ringen en armbanden kunnen het kledingstuk beschadigen.

Het volgende kan uw kledingstuk beschadigen: zalven, benzine, oliën, stomerijvloeistof, terpentijn. Directe verwarming - strijken, radiatoren, wasdrogers enz. Lange of gekartelde kartelige voetenagels en vingernagels. Direct zonlicht. Onjuist aanbrengen bijvoorbeeld rukken en trekken met de hoogste band. Defecte schoenen.

Zeer zelden kunnen compressiekleding allergische reacties veroorzaken. Als er acute pijn in de ledematen of huidirritaties optreden terwijl de het kledingstuk wordt gedragen, verwijder de kleding dan en raadpleeg onmiddellijk uw arts. Ga altijd naar afspraken.

Contra-indicaties

Absolute contra-indicaties

- Gevorderde perifere arteriële occlusieve ziekte
- Gedecompenseerde hartziekte
- Ongecontroleerd congestief hartfalen
- Onbehandelde septische flebitis
- Phlegmasia coerulea dolens

Relatieve contra-indicaties

- Huidinfecties
- Etterende dermatose
- Allergische reactie op weefsel
- Verminderde gevoeligheid van het ledemaat
- Perifere neuropathie
- Open wonden

Verzorgingsinstructies



Machinewas, maximaal 40°



Niet strijken



Droogtrommel op lage warmte



Niet chemisch reinigen



Niet bleken



Opslaan uit de buurt van directe warmte




Uit de buurt van direct zonlicht bewaren



Droog aan de lijn weg van directe hitte en direct zonlicht

Instructies voor het aanbrengen van het Teenkapje

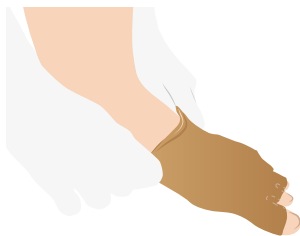

1. Zorg ervoor dat de naden op het Teenkapje /Handschoen naar buiten zijn gericht.
2. Plaats tenen / vingers en voet / hand in de opening.



3. Plaats zodat het kledingstuk comfortabel past.
4. Werk Teenkapje/Handschoen tussen uw tenen / vingers naar de beschikbare plaats.

Knip naar pasvorm

Als de teenlengtes te lang zijn, markeer de teen dan op de juiste lengte, verwijder het Teenkapje, snijd de lengte naar het gemarkeerde gebied en breng opnieuw aan. Wees voorzichtig om niet te veel van de teenlengte te verwijderen.

Verwijderen

Om te verwijderen, trekt u voorzichtig aan het uiteinde van elke teen aan het Teenkapje en schuift u deze van de voet af.

Opslag / Garantie

Medische compressiekleding moet op een koele, droge, donkere plaats worden bewaard zonder blootstelling aan direct zonlicht, extreme temperaturen of uitlaatgassen. Een houdbaarheid van 3 jaar is gegarandeerd onder de juiste bewaarcondities.

Een medisch compressiekledingstuk dat vaak wordt gedragen, is onderhevig aan materiaalveroudering en natuurlijke slijtage, bijvoorbeeld frequent wassen. Voor kledingstukken in gebruik is de garantietermijn 6 maanden.

Kleding mag niet worden gebruikt na de vervaldatum die op de buitenkant van de verpakking is afgedrukt. Aan het einde van hun leven kunnen kledingstukken als huishoudelijk afval worden weggegooid.

Grootte

Teenkapje

Omtrek cm

XS

S

M

L

XL



a BAL VAN VOET

21-23

23-25

25-27

27-29

29-31

Handschoen

Omtrek cm

XXS

XS

S

M

L



a ONDERAAN VINGERS

14-16

16-18

18-20

20-22

22-24

b PALM BIJ VOUW VAN DUIM

15-17

17-19

19-21

21-23

24-26



Haddenham Healthcare Ltd, 4D Drakes Drive,
Long Crendon, HP18 9BA, United Kingdom

Haddenham Healthcare Ltd, Unit 6,
3/4 Anzed Court, Mulgrave, VIC 3170 Australia

Haddenham LLC, 3300 International Airport Drive
Suite 1100, Charlotte, NC 28208 United States

IFU-MF-001-INT(NL) ver.01