



Instructies voor het dragen

Lipocare® is de lijn die speciaal is ontworpen voor de behandeling van oedeem in de onderste extremiteiten. Dankzij hoogwaardige medische technologie en garens helpt het de pijn en het zware gevoel in de benen, die kenmerkend zijn voor deze aandoening, te verminderen en de mobiliteit te verbeteren.

Beoogd gebruik en doelgroep

Het beoogde gebruik van de elastische compressiehulpmiddelen uit de Lipocare lijn is specifiek voor de behandeling van oedeem, ook in combinatie met aandoeningen van het veneuze systeem.

Samenstelling

Light variant: Polyamide 60%, elastaan 40%

Strong variant: Polyamide 74%, elastaan 26%

Indicaties

- Lymf-lipoedeem
- Primaire en secundaire lymfoedeem in de verschillende klinische stadia van ontwikkeling
- Flebolympoedeem
- Lipoedeem
- Cellulite

Contra-indicaties

- Acute vorm van hypodermatitis
- Acute huidinfecties
- Perifeer oblitererende arteriopathie
- Bekende geschiedenis van contactallergie veroorzaakt door elastische hulpmiddelen

Product bewaren

Bewaar het product op een koele en droge plaats, in de originele verpakking. Bescherm het tegen direct zonlicht.

Was instructies

- De wasmachine instellen op temperaturen die niet boven de 40°C komen
- Gebruik bij voorkeur neutrale zeep en geen wasverzachter
- Kies voor een zachte centrifugeerstand
- Laat het drogen op een vlakke ondergrond, uit de buurt van warmtebronnen en bij voorkeur niet in de zon
- Houd er rekening mee dat regelmatig wassen de kous niet beschadigt, maar juist de levensduur verlengt

Omgaan met beschadigde hulpmiddelen

Als het hulpmiddel beschadigd is, neem dan onmiddellijk contact op met de leverancier.

Bijwerkingen en ernstige incidenten

Op dit moment zijn er geen bekende bijwerkingen of ernstige incidenten. Mocht zich echter een negatief voorval voordoen tijdens het gebruik, raadpleeg dan uw arts. In het geval van een ernstig incident met het hulpmiddel, neem dan onmiddellijk contact op met de leverancier en de bevoegde arts.