



Manufactured in the UK

Skinwear Limited, Unit 6, 1 Mill View,

Hickley, Leics, LE10 1XD

www.skinniesuk.com

Tel. +44 01562 546 123



Gebruiksaanwijzing

Algemene Informatie	p 1
Draaginstructies	p 1
Wasvoorschriften	p 2
Slijtage.....	p 2
Indicaties	p 2
Contra-indicaties	p 2

ALGEMENE INFORMATIE

Bedankt dat u voor Skinnies WEB hebt gekozen. Skinnies WEB is een innovatief buisverband dat speciaal is ontwikkeld voor het fixeren van verbanden bij complexe wonden over het hele lichaam, waarbij een goede fixatie noodzakelijk is. Het is ontwikkeld in samenwerking met patiënten, verzorgers en medische experts van King's College in Londen. Het is ontworpen voor patiënten met Epidermolysis Bullosa, maar kan ook ingezet worden bij andere aandoeningen zoals brandwonden, oncologische bestralingswonden of postoperatieve wonden.

Sinds 2017 is Skinnies WEB opgenomen in de "Best Practice Guidelines Skin and Wound Care in Epidermolysis Bullosa" en wordt het wereldwijd gebruikt. Het buisverband is naadloos uit één stuk gemaakt, wat ervoor zorgt dat er geen wrijving is en er geen druk van naden op de wonden plaatsvindt. Door de extreme rekbaarheid is het buisverband gemakkelijk aan te brengen. Knippen met een schaar of plakken met plakband is niet nodig. Deze rekbaarheid zorgt ook voor extra draagcomfort.

DRAAG INSTRUCTIES

Skinnies WEB wordt gebruikt om het wondverband op het lichaam op de plaats te houden, zodat dit niet verschuift en/of loslaat. Breng eerst de (wond)verbanden aan zoals gewenst. Gebruik Skinnies WEB niet direct op de wond. Gebruik vervolgens een Skinnies WEB product dat geschikt is voor het lichaamsdeel. **Rol de Skinnies WEB aan (of uit) over de (wond)verbanden om te voorkomen dat ze verschuiven. Niet extreem uittrekken.** Verplaats de Skinnies WEB waar nodig om de (wond)verbanden te bedekken en ervoor te zorgen dat het comfortabel zit.

Let op: de kleding lijkt klein, maar is tot 7x rekbaar.

WASVOORSCHRIFTEN

Samenstelling: 83% Nylon, 17% Elastaan

Skinnies WEB moet op dezelfde manier worden verzorgd als delicate kleding. We raden aan om je Skinnies WEB in een wasnet te wassen. Gebruik voor het wassen van Skinnies WEB een normaal mild wasmiddel.

DOEN

Wassen op 60° C

Drogen in de droogtrommel op lage temperatuur

NIET DOEN

Bleken

Strijken

Stomen of chemisch reinigen

Gebruik was additieven zoals wasverzachter, optische witmaker of vlek verwijderaar

Drogen op een verwarmingselement of in direct zonlicht

SLIJTAGE

Let op: Scherpe vingernagels, ringen en armbanden kunnen het kledingstuk beschadigen. Pilling of lussen mogen nooit worden uitgetrokken of afgesneden.

Advies: Bij voorkeur gewone kleding dragen over de Skinnies WEB kleding als bescherming.

INDICATIES

Skinnies WEB is ontworpen voor het fixeren verbanden en kan worden gebruikt voor patiënten met Epidermolysis Bullosa en andere aandoeningen zoals brandwonden, oncologische stralingswonden of postoperatieve wonden.

CONTRA-INDICATIES

Als er acute pijn of huidirritaties optreden tijdens het dragen van Skinnies WEB, verwijder dan de buisverband kledingstukken en raadpleeg onmiddellijk uw arts.